

Meywalk 2000

Il deambulatore versatile e flessibile, adatto a tutte le età: dai 4 ai 100 anni



Meywalk 2000 in posizione normale



Meywalk 2000 con seduta sollevata per l'accesso al deambulatore

Misura	Utente
SMALL	per bambini dai 4 ai 7 anni
MEDIUM	per bambini dai 5 ai 14 anni
LARGE	per adulti dai 14 anni

Disponibile in tre misure, **Large**, **Medium** e **Small**, il deambulatore Meywalk 2000 è regolabile nell'altezza della seduta e del supporto toracico, per adattarsi all'evoluzione delle più svariate esigenze.

L'**impugnatura anteriore** può essere regolata in inclinazione per assicurare una posizione confortevole e bilanciata.

L'**anello toracico** e la **seduta** di Meywalk 2000 sostengono l'utente e lo aiutano a tenere la posizione eretta.

Entrambi sono regolabili in altezza indipendentemente l'uno dall'altro. Tale regolazione è lineare, consente cioè di adattarsi a qualsiasi variazione di statura o necessità, in questo modo il deambulatore può essere facilmente personalizzato in base alle esigenze dell'utilizzatore.

L'**anello toracico** è disponibile in cinque misure in base alla circonferenza toracica:

- fino a 70 cm
- fino a 90 cm
- fino a 105 cm
- fino a 120 cm
- fino a 130 cm

e può essere scelto in tre varianti:

- rialzato nella parte anteriore, per coloro che necessitano di maggior sostegno del torace
- piatto, per coloro che hanno un buon controllo del tronco
- curvo verso il basso, ideale per le donne



Anello toracico, nella variante rialzata nella parte anteriore

CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre misure: Large, Medium e Small
- Favorisce un andamento più naturale e corretto del corpo grazie alle sospensioni a molle
- Sistema di sollevamento della seduta che agevola l'accessibilità da parte dell'utente
- Per uso sia interno che esterno

Meywalk 2000 è provvisto di **sospensioni a molle** che riproducono il naturale movimento ondulatorio del corpo durante il cammino, al fine di stimolare e favorire la deambulazione.

Le molle sono disponibili in quattro dimensioni in base al peso dell'utente e riconoscibili dal colore:

- Da 20 a 45 Kg = molle bianche
- Da 45 a 65 Kg = molle gialle
- Da 65 a 80 Kg = molle blu
- Da 80 Kg = molle rosse



*Molle nella misura
da 45 a 65 Kg*



Meywalk 2000 nelle misure Medium, Large e Small

Meywalk 2000

DATI TECNICI

	Small	Medium	Large
Regolazione altezza seduta	44-66 cm	62-86 cm	76-100 cm
Regolazione altezza anello toracico	81-100 cm	93-117 cm	108-131 cm
Lunghezza	85 cm	95 cm	95 cm
Larghezza	68 cm	68 cm	68 cm
Diametro ruote anteriori	150 mm	200 mm	200 mm
Diametro ruote posteriori	400 mm	400 mm	400 mm
Peso	22 kg	25 kg	26 kg
Portata massima	100 kg	100 kg	100 kg
Colore disponibile	Verde	Blu	Blu

RICONDUCEBILITÀ CODICI ISO 03.78.09.003, 03.48.21.201, 03.48.21.204, 03.48.21.207

La **struttura** è realizzata in acciaio trattato con polvere epossidica.

I **componenti** e gli **accessori** sono cromati neri/elettrozincati.

Le **ruote** anteriori e posteriori sono in gomma piena antiforatura, sia per uso interno che esterno.

Meywalk® 2000 è **certificato CE** e soddisfa le norme in vigore.



Vista posteriore del Meywalk 2000

ACCESSORI

DI SERIE OPZIONALI

Impugnatura anteriore	Ruote anti-ribaltamento
Anello toracico (misura a scelta)	Dispositivo anti-retromarcia
Freno posteriore	Supporti per anche
Seduta	Divisorio per gambe
Ruote anteriori piroettanti	Guide esterne per piedi
	Regolazione della resistenza sui freni posteriori
	Blocco direzionale per ruote anteriori

I deambulatori distribuiti da Medimec promuovono la socializzazione e contribuiscono ad aumentare la qualità della vita.



Meywalk 2000 misura S