



N72012	Seahorse Plus Piccola (ruote orientabili da 100 mm)	N72024	Seahorse Plus Media (ruote orientabili da 100 mm)
N72036	Seahorse Plus Grande (ruote orientabili da 100 mm)		

⚠ Avvertenza generale per la sicurezza ⚠

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente queste istruzioni. Il mancato rispetto di questa avvertenza può essere causa di lesioni. Conservare le presenti istruzioni in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

Peso utente massimo



64 kg

Piccolo



102 kg

Medio



152 kg

Grande

1. USO PREVISTO

La sedia Seahorse Plus è progettata come ausilio per bambini e ragazzi per i bisogni corporali e per fare la doccia. Essa può anche essere utilizzata per gestire l'utente nello spazio di una stanza da bagno. Tuttavia, essa non è progettata per scopi di trasporto in generale e non è progettata per essere utilizzata all'aperto.



Seahorse Plus (Media)

2. SICUREZZA

AVVERTENZA: Non superare il peso massimo dell'utente riportato sopra.

Consigliamo vivamente di fare effettuare una valutazione da parte di un professionista qualificato del settore sanitario (per esempio un ergoterapeuta) prima di acquistare/utilizzare la sedia.

In relazione a questa valutazione:

- La sedia Seahorse Plus è indicata per gli utenti che sono in grado, oppure no, di alzarsi, e può essere usata con un sollevatore adatto allo scopo.

- La sedia Seahorse Plus è indicata per gli utenti che necessitano di un sostegno posturale moderato.
- La sedia Seahorse Plus è indicata per gli utenti che presentano un disturbo cognitivo da lieve a grave, a condizione che questi utenti rimangano sempre sotto una supervisione durante l'uso.

AVVERTENZA: Non lasciare esposta per lunghi periodi la sedia Seahorse Plus a una forte luce solare - questo può causare lo scolorimento o il degrado dei materiali.

3. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

3.1 Caratteristiche

1. Inclinazione dell'assetto con servoassistenza a gas, per consentire l'inclinazione agevole e in sicurezza del sedile mentre è occupato.
2. Poggiatesta oscillabile regolabile in altezza e in profondità.
3. Imbottiture opzionali di schiuma morbida disponibili in due misure per ciascun modello di sedia.
4. Cinghia addominale imbottita.
5. Braccioli rimuovibili.
6. Paraspruzzi morbido/supporto divisorio staccabili per minimizzare l'avvicinamento delle anche al piano mediano del corpo.
7. Poggiatesta ribaltabili verso l'alto e bloccabili, regolabili in altezza in modo indipendente, completi di cinghie ferma-piedi.
8. Grandi ruote orientabili che non lasciano impronte, con freni indipendenti.
9. Telaio regolabile in altezza.
10. Tazza WC di grande capienza.


La sedia Seahorse Plus richiede l'assemblaggio secondario delle parti seguenti:

Parti di serie	Accessori opzionali
Poggiatesta	Imbottiture per il sedile
Cinghie ferma-piedi	Supporto ventrale
Cinghia addominale	Imbracatura per l'addome
Poggiatesta	Imbracatura incrociata
Braccioli	
Supporto divisorio	

Consultare la Sezione 4 per le istruzioni di montaggio dettagliate.

3.2 Accessori

Imbottiture per il sedile

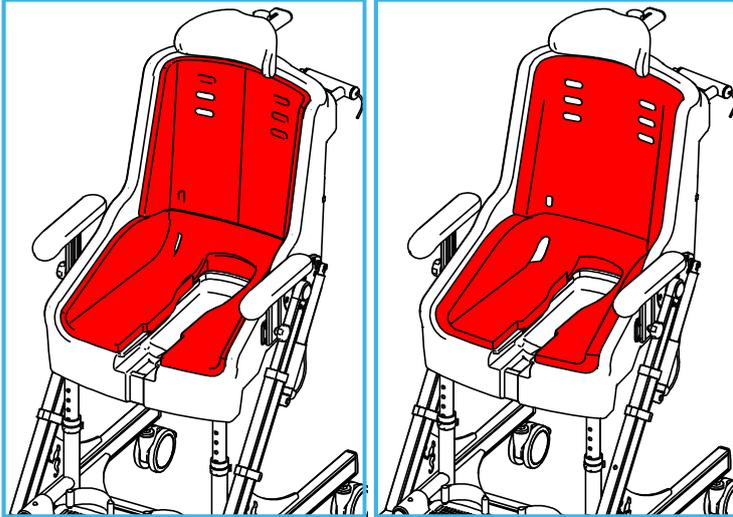


Imbottiture per il sedile sottili	Imbottiture per il sedile spesse
N72322: Piccola (Taglia 2)	N72310: Piccola (Taglia 1)
N72346: Media (Taglia 4)	N72334: Media (Taglia 3)
N72679: Grande (Taglia 6)	N72668: Grande (Taglia 5)
Imbottiture extra-spesse	
N84981: Grande (Taglia 7)	

Supporto ventrale


I supporti ventrali sono progettati per offrire un sostegno aggiuntivo all'utente per i bisogni corporali.

Il design ribaltabile verso l'alto consente all'utente un facile accesso per salire e scendere dalla sedia.

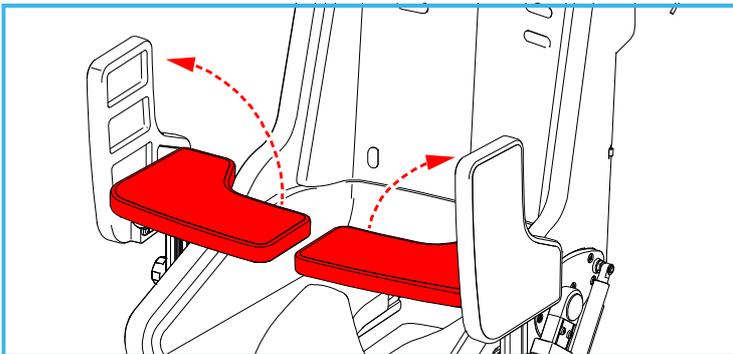

Supporto ventrale
N72127: Piccolo
N72188: Medio/grande

Imbracature del sedile

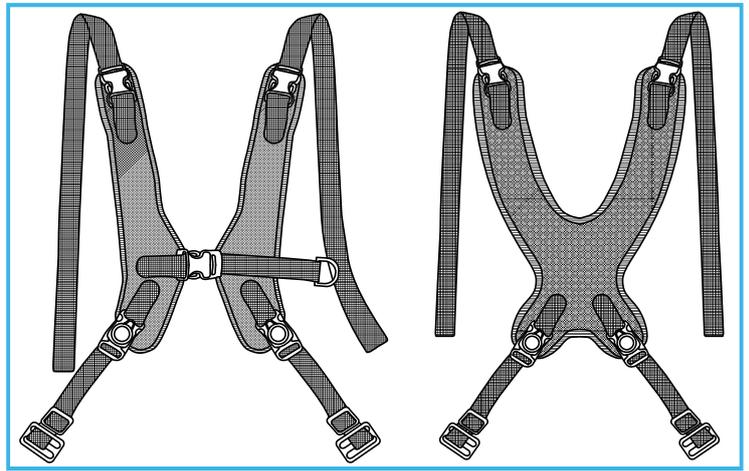


Imbracatura per l'addome	Imbracatura incrociata
N72139: Piccolo	N72152: Piccolo
N72140: Medio	N72164: Medio
N72723: Grande	N72759: Grande

4. MONTAGGIO


4.1 Montaggio dei poggiatesta

Nota: Ciascun poggiatesta è specifico di un lato destro/sinistro della sedia.

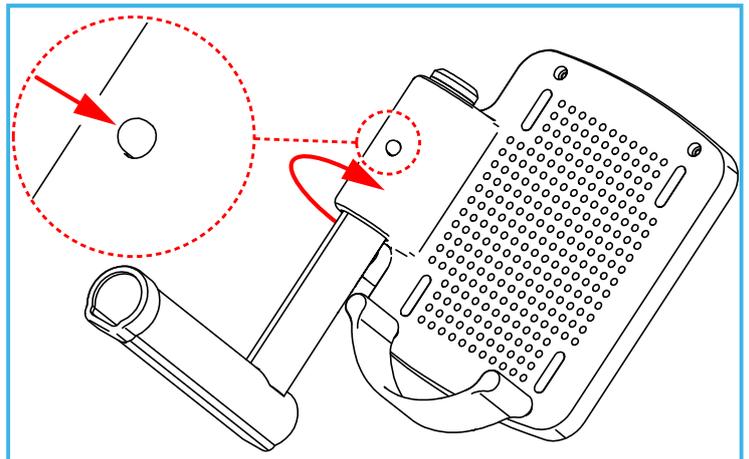


1. Dispiegare i poggiatesta per fare scattare in posizione i fermi a pulsante.

Nota: Per piegare i poggiatesta, premere i fermi a pulsante e sollevare i poggiatesta nella posizione chiusa.

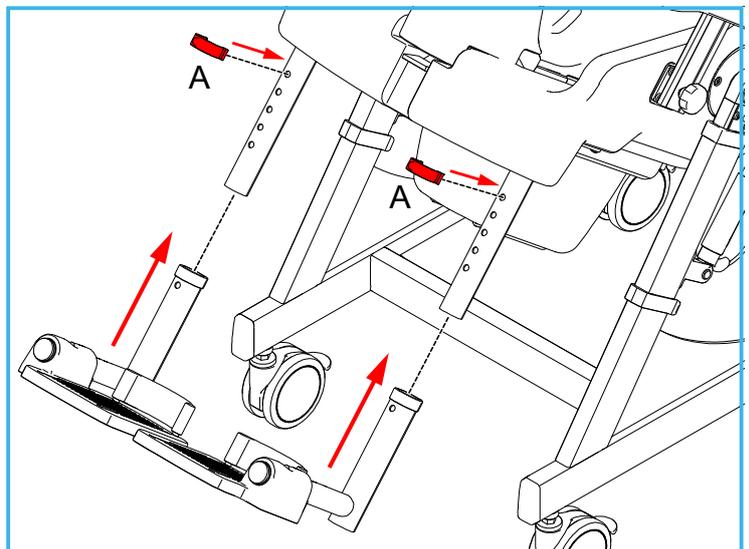

- Inclinare la sedia nella posizione reclinata (vedere la sezione 5.5).
- Fare scorrere i poggiatesta sui tubi di supporto.
- Regolare sull'altezza desiderata i poggiatesta, allineare i fori e inserire i fermi di regolazione dell'altezza (A).
- Riportare la sedia nella posizione eretta.

4.2 Installazione delle cinghie ferma-piedi

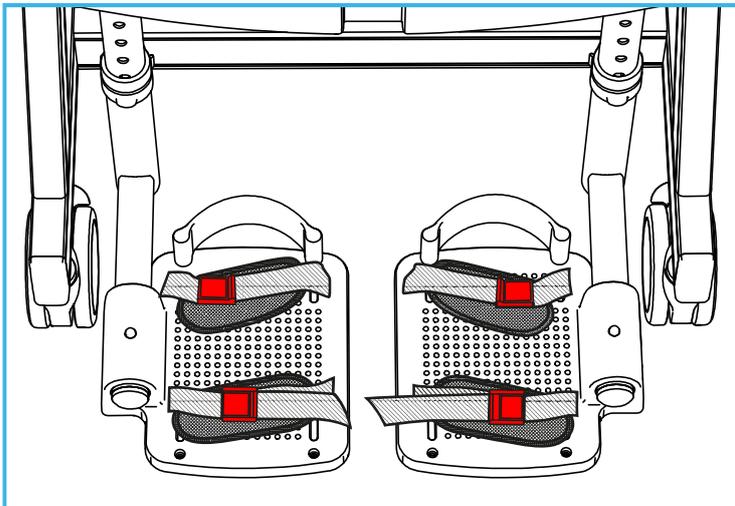

- Sganciare la fibbia di regolazione di plastica e far passare il nastro attraverso le fessure nei poggiatesta, lasciando la fibbia nella posizione più in alto.
- Far passare l'estremità libera della cinghia attraverso la fibbia e allacciarla saldamente.


4.3 Installazione delle imbottiture (opzionali)

La sedia è fornita priva delle imbottiture installate.

Esistono due misure di imbottiture per ciascun modello di sedia (vedere la sezione 3.2 per i dettagli).

Se al momento dell'acquisto erano state ordinate le imbottiture, queste saranno incluse nella consegna.

Nota: Consigliamo di installare l'imbottitura della seduta prima di installare l'imbottitura dello schienale.

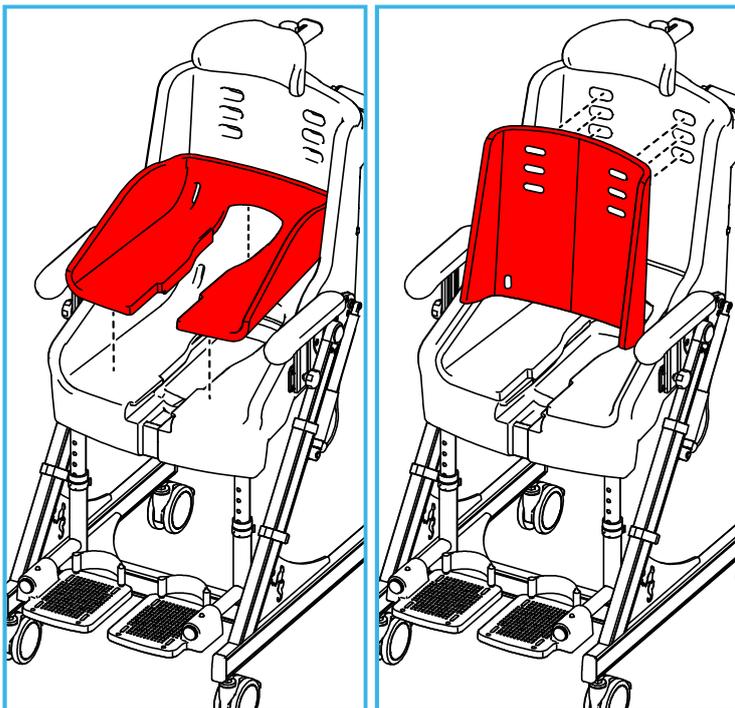

- Rimuovere le imbottiture dall'imballaggio e inserirle nella seduta della sedia come mostrato.


- Assicurarsi di premere saldamente le imbottiture nelle fessure nello schienale della sedia.

4.4 Installazione del supporto divisorio

Il supporto divisorio può essere usato come aiuto per posizionare l'utente. Esso, inoltre, contribuisce a fissare in posizione l'imbottitura della seduta.

Nota: Il supporto divisorio deve essere installato DOPO aver installato le imbottiture.


AVVERTENZA: Prestare attenzione, quando si inserisce il supporto divisorio, per minimizzare il rischio di intrappolamento dell'utente.

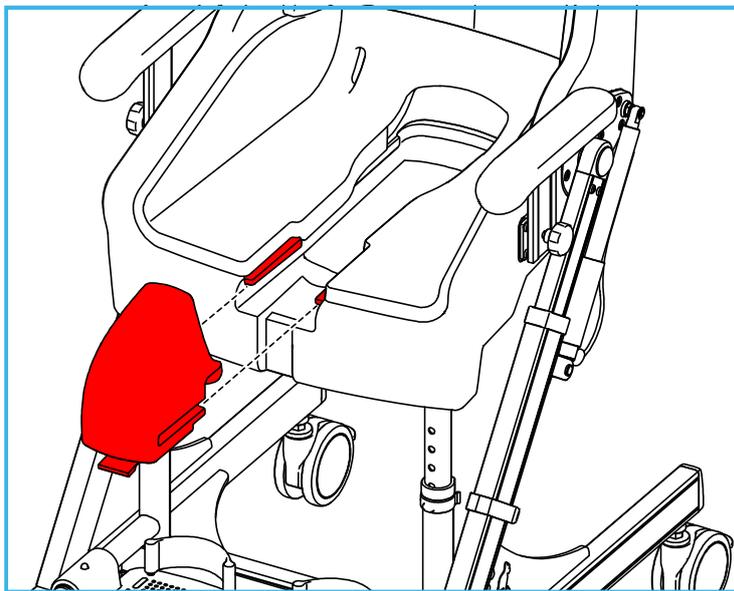

Fare scorrere il supporto divisorio sui binari di posizionamento della sedia e premere saldamente finché non si installa con uno scatto in posizione.

4.5 Installazione del poggiatesta

ATTENZIONE: Consigliamo vivamente l'utilizzo del poggiatesta per sostenere completamente il capo e il collo dell'utente, soprattutto quando si inclina la sedia.

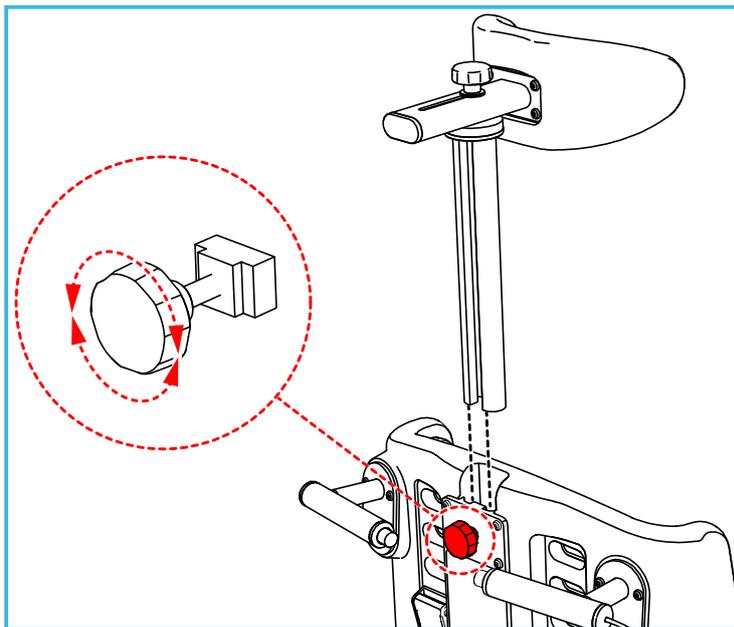

- Con la seduta della sedia nella posizione eretta, individuare la fessura per il poggiatesta ubicata sulla sommità della sedia.

2. Ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione per allentare il dado a T.
3. Installare il poggiatesta nella fessura, verificando che il dado a T scorra nella colonna del poggiatesta.
4. Stringere in senso orario la manopola di regolazione per fissare il dado a T alla colonna del poggiatesta.

4.6 Installazione della cinghia addominale


La cinghia addominale deve essere installata sulla sedia prima dell'uso. Assicurarsi di disporre della cinghia addominale della misura corretta per la sedia:

N99089: Piccola


N99091: Media

N99108: Grande

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente la cinghia addominale fornita insieme alla sedia. Verificare a intervalli regolari l'eventuale presenza di segni di usura o danni e sostituire ove necessario (vedere la sezione dei ricambi 13)

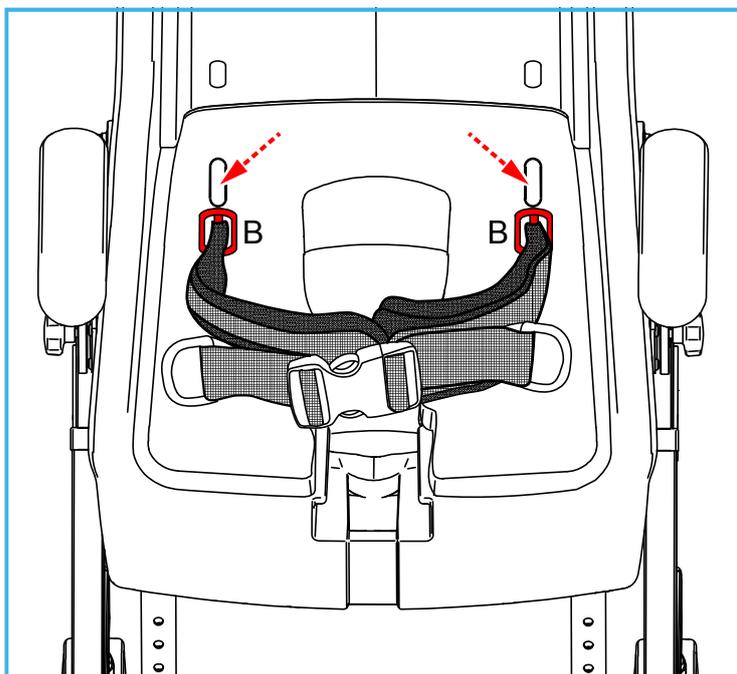

1. Per installare la cinghia addominale, far passare le due fibbie posteriori attraverso le fessure nell'imbottitura e nella sedia.
2. Le fibbie (B) devono essere premute a fondo per farle passare completamente attraverso le fessure, ruotandole di 90 gradi.

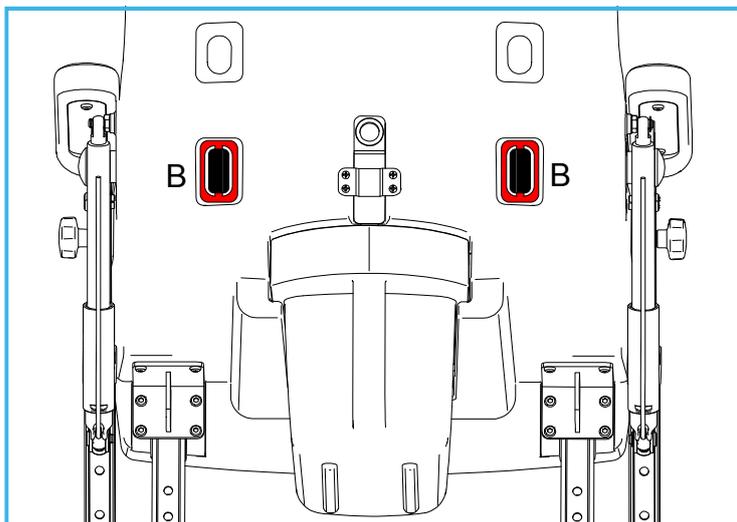


3. Tirare le cinghie dal davanti per posizionare le fibbie (B) come illustrato. Assicurarsi che le fibbie non possano passare attraverso la seduta, tirando con decisione.

4.7 Installazione dei braccioli

La sedia è dotata di braccioli, spediti in una scatola separata. Essi devono essere montati prima dell'uso.

Nota: Ciascun bracciolo è specifico del lato destro/sinistro della sedia. Il bracciolo deve puntare verso il basso in corrispondenza della parte anteriore.

AVVERTENZA: La sedia è progettata per essere utilizzata con i braccioli in posizione. Essi possono essere rimossi se sono d'intralcio per l'utente quando sale/scende dalla sedia (per esempio durante la movimentazione dell'utente con il sollevatore o per i trasferimenti laterali). Tuttavia, i braccioli (o i supporti ventrali opzionali) devono sempre essere installati quando si aziona la funzione di inclinazione dell'assetto della sedia.

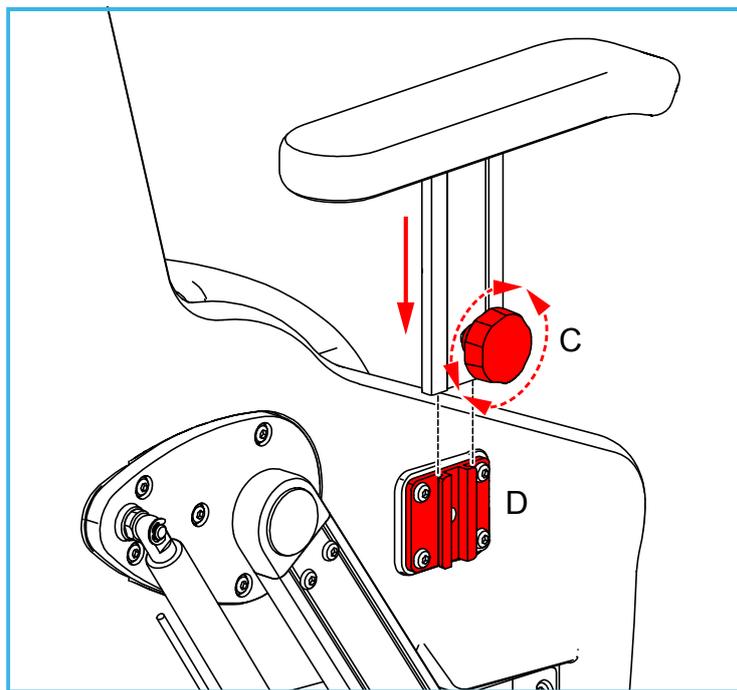

1. Ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (C) per allentare.
2. Infilare i braccioli sulle piastre di montaggio (D) su entrambi i lati della sedia.
3. Stringere in senso orario la manopola di regolazione (C) per fissare i braccioli.

5. FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE IN GENERALE

La sedia Seahorse Plus è progettata come ausilio per bambini e ragazzi per i bisogni corporali e per fare la doccia. Essa può essere utilizzata sopra al water oppure con la tazza WC in dotazione.

La sedia Seahorse Plus può essere utilizzata per gestire l'utente nello spazio di una stanza da bagno. Essa non è progettata per essere usata come sedia a rotelle per scopi generici di trasporto.

La sedia Seahorse Plus è costruita con materiali resistenti alla corrosione. Tuttavia, dopo ogni utilizzo deve essere asciugata con un panno.

La sedia Seahorse Plus non è progettata per essere usata o tenuta all'aperto.

Assicurarsi che l'altezza della seduta sia regolata correttamente (vedere la sezione 5.2) e che la tazza WC sia stata rimossa (vedere la sezione 5.8) prima dell'utilizzo su un water. Al momento di posizionare la sedia sopra al water, ricordare di verificare che l'apertura nel sedile sia allineato con la tazza del water, per evitare versamenti fuori da essa.

AVVERTENZA: Prima di usare la sedia per la prima volta, assicurarsi che questa sia completamente assemblata (vedere la sezione 4), e che la sedia sia regolata correttamente per l'utente, come descritto sotto.

AVVERTENZA: Prima di fare salire o scendere l'utente dalla sedia, assicurarsi che le ruote orientabili siano bloccate (tranne quando si usa il sollevatore). Assicurarsi che i poggiatesta siano ribaltati verso l'alto e che l'utente non si appoggi su di essi.

AVVERTENZA: Non usare la sedia per trasportare l'utente su o giù per rampe o pendenze ripide.

AVVERTENZA: Non lasciare l'utente da solo sulla sedia, non lasciare la sedia in un ambiente non custodito.

AVVERTENZA: Consigliamo di utilizzare sempre la cinghia addominale durante la doccia o il bagno, per ridurre il rischio che l'utente scivoli giù dalla sedia.

5.1 Funzionamento dei freni delle ruote orientabili

La sedia presenta 4 ruote orientabili bloccabili in modo indipendente. Consigliamo che i blocchi delle ruote orientabili rimangano sempre inseriti a fondo quando la sedia è ferma (tranne che durante il sollevamento).

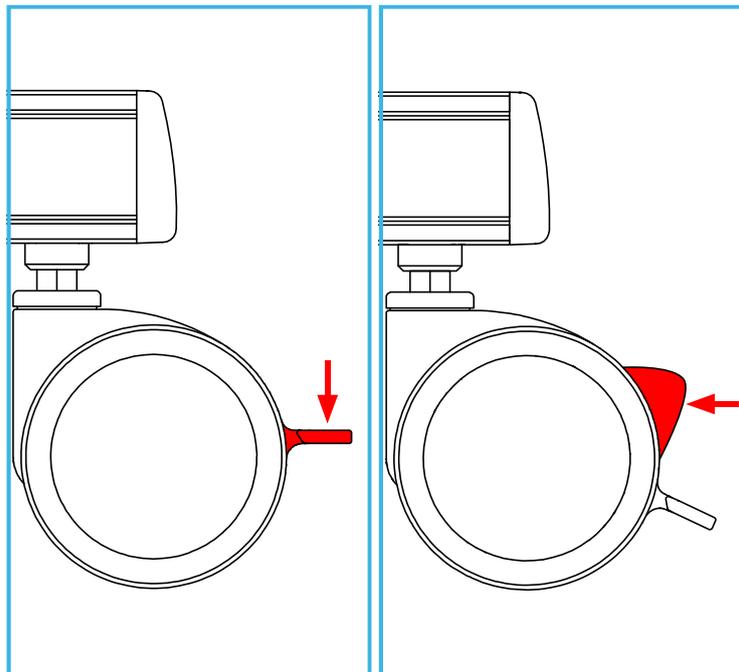


Fig 1: Ruota orientabile sbloccata

Fig 2: Ruota orientabile bloccata

1. Per bloccare il freno della ruota orientabile, premere verso il basso la linguetta di quest'ultima (Fig. 1).
2. Per disimpegnare il freno della ruota orientabile, premere, facendolo rientrare, il pulsante posto sopra alla linguetta della ruota orientabile (Fig. 2).

3. Per avere la massima stabilità (soprattutto quando si inclina la sedia), fare ruotare all'indietro e bloccare le ruote orientabili posteriori (Fig. 2).


5.2 Regolazione dell'altezza del sedile

L'altezza del sedile può essere regolata per adattarla a utenti differenti e per contribuire al posizionamento sopra a un water.

Sono presenti 4 fori di regolazione, che consentono una regolazione di 108 mm. Ciascuna posizione è contrassegnata da una riga sullo stelo superiore e da un numero (1-4), dove 1 è l'impostazione più bassa e 4 è quella più alta.

AVVERTENZA: Durante la regolazione dell'altezza del sedile, la sedia non deve essere occupata.

AVVERTENZA: Controllare che entrambi i fermi di regolazione dell'altezza siano saldamente installati prima dell'uso.

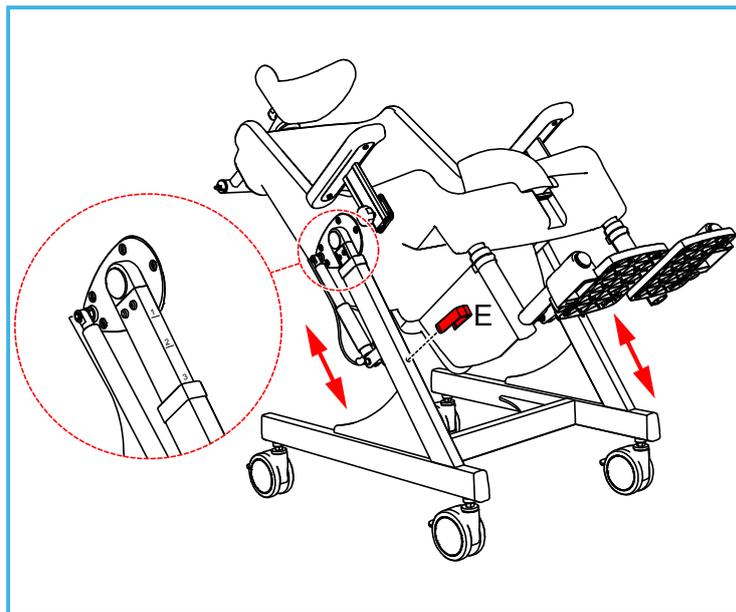


1. Bloccare tutt'e 4 le ruote orientabili (vedere la sezione 5.1).
2. Rimuovere la tazza WC (vedere la sezione 5.8).
3. Inclinare la sedia finché lo schienale non sarà in linea con gli steli angolati (vedere la sezione 5.5).
4. Rimuovere entrambi i fermi di regolazione dell'altezza (E).
5. Sostando dietro al sedile, appoggiare un piede sulla sbarra inferiore del telaio. Questo contribuirà a impedire che il telaio si possa muovere al momento di sollevare il sedile. Inserire la mano nel foro della tazza WC e sollevare o abbassare il sedile. Quest'operazione richiede l'esercizio di una forza non trascurabile e potrebbe necessitare di due persone.
6. Allineare il segno dell'altezza desiderata sullo stelo interno con lo stelo esterno.
7. Inserire il fermo di regolazione dell'altezza (E). Ripetere l'operazione sull'altro stelo, assicurandosi che venga usato il segno di riferimento per la medesima altezza.
8. Riportare la sedia nella posizione verticale (vedere la sezione 5.2).

5.3 Regolazione dei poggiatesta

L'altezza dei poggiatesta può essere regolata in incrementi di 25 mm, fino a un totale di 100 mm (sedia di misura piccola e media) e di 125 mm (sedia grande).

Se l'altezza del sedile si trova sulla sua regolazione più bassa (vedere la sezione 5.2), e i poggipiedi sono posizionati sulla loro regolazione più bassa, consigliamo di inclinare leggermente il sedile per assicurarsi che le ruote orientabili anteriori possano ruotare liberamente.

AVVERTENZA: Prima di utilizzare la sedia, verificare che i fermi di regolazione siano impegnati completamente.

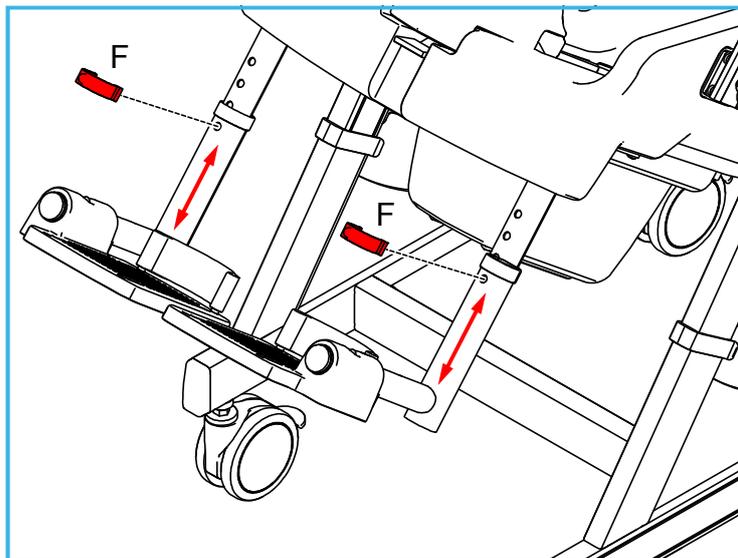


1. Per eseguire la regolazione, rimuovere il fermo di regolazione (F) sul poggipiede.
2. Alzare o abbassare il poggipiede e verificare che i fori nel tubo interno ed esterno siano allineati.
3. Riposizionare i fermi di regolazione (F).

5.4 Regolazione del poggiatesta

Il poggiatesta può essere regolato sia orizzontalmente che verticalmente.

AVVERTENZA: Prima del suo utilizzo, assicurarsi che le manopole di regolazione siano strette a fondo.

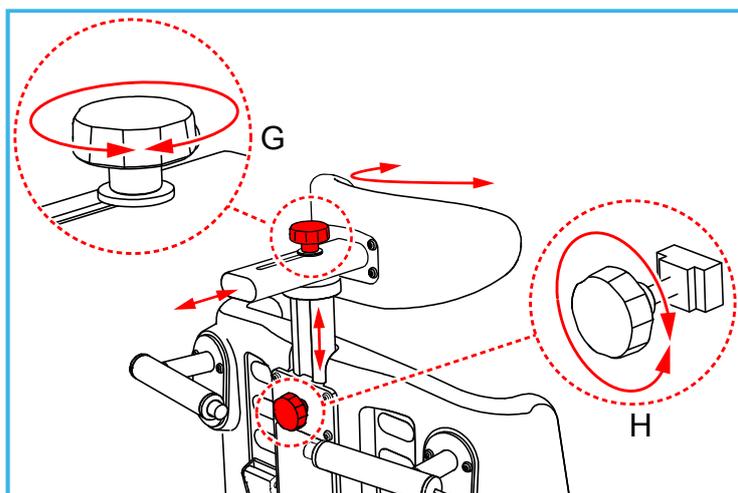

1. Girare la manopola di regolazione (G) in senso antiorario per sbloccare il poggiatesta. A questo punto, il poggiatesta può essere spostato avanti e indietro e ruotato da sinistra a destra.
2. Girare la manopola di regolazione (G) in senso orario per assicurare il poggiatesta.
3. Girare la manopola di regolazione (H) in senso antiorario per sbloccare la colonna del poggiatesta. Ora il poggiatesta può essere spostato su e giù.


4. Girare la manopola di regolazione (H) in senso orario per assicurare la colonna del poggiatesta.

5.5 Funzionamento dell'inclinazione dell'assetto

La sedia può essere inclinata dalla posizione eretta fino a un'inclinazione di 40° in un movimento fluido e continuo. Essa è controllata da molle a gas ubicate sui due lati della sedia (sulle sedie di taglia piccola da una sola molla a gas).

AVVERTENZA: Prima di azionare il meccanismo di inclinazione dell'assetto, verificare che le braccia e i piedi dell'utente si trovino sui braccioli e sui poggipiedi.


AVVERTENZA: Assicurarsi che le ruote orientabili posteriori siano puntate verso il retro e siano bloccate prima di inclinare la sedia.

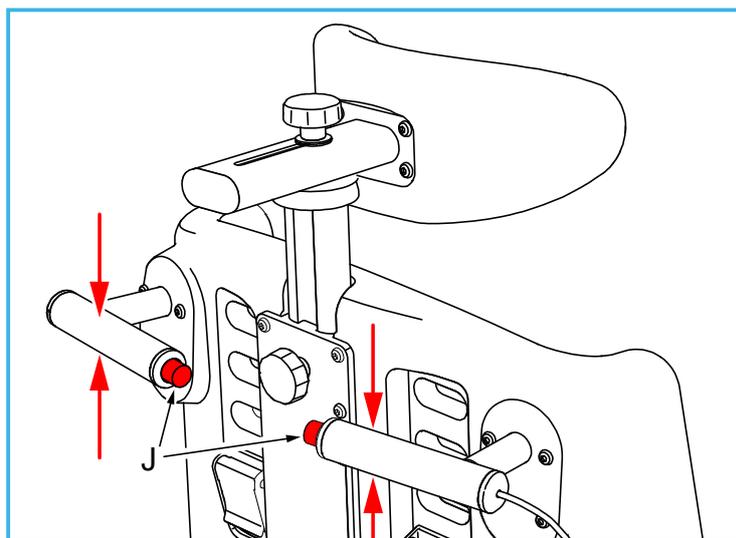

1. L'operazione di inclinazione dell'assetto avviene premendo entrambi i pulsanti rossi (J) simultaneamente sulle maniglie di spinta posteriori, spingendo contemporaneamente queste ultime verso il basso.

Nota: La sedia di taglia piccola dispone di un solo pulsante di pressione.


Nota: Assicurarsi di premere a fondo i pulsanti a pressione rossi prima di spingere verso il basso le maniglie di spinta, onde evitare danni al meccanismo.

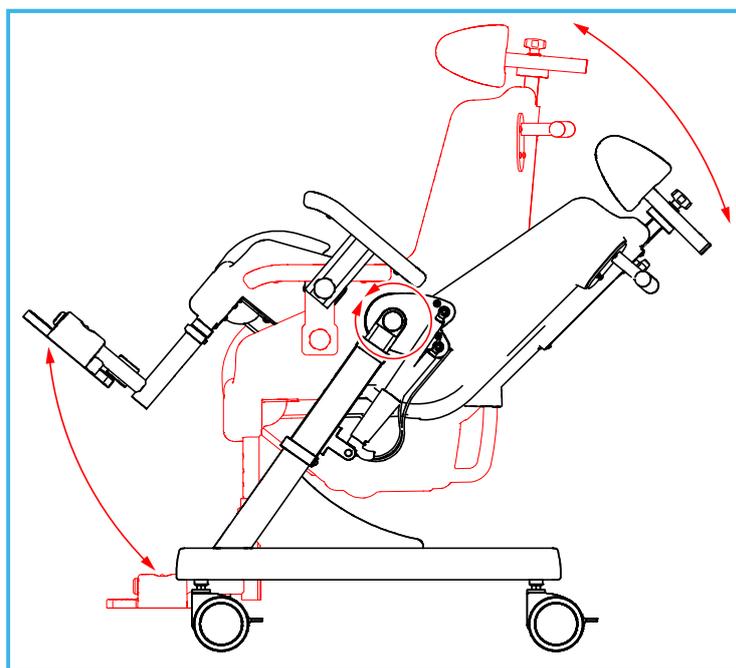


- Una volta ottenuto l'angolo desiderato, rilasciare i due pulsanti rossi e la sedia si bloccherà sull'angolazione raggiunta.
- Per riportare la sedia in posizione eretta, premere verso il basso le maniglie di spinta per sostenere il peso dell'occupante, quindi premere i pulsanti rossi (J) per rilasciare il blocco.
- Sollevare la sedia nella posizione eretta tirando delicatamente verso l'alto le due maniglie di spinta. Una volta che la sedia si trova nella posizione desiderata, rilasciare i due pulsanti rossi.

5.6 Uso e regolazione della cinghia addominale


AVVERTENZA: Assicurarsi che la cinghia addominale sia correttamente regolata per l'utente ogni volta che quest'ultimo occupa la sedia. Se la cinghia addominale non è regolata correttamente, l'utente potrebbe scivolare in avanti sulla sedia.

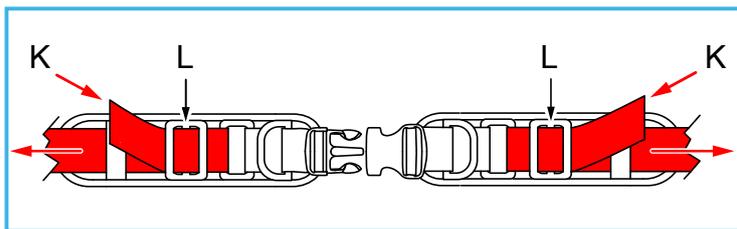


- Allentare la cinghia addominale su entrambi i lati facendo passare l'estremità libera del nastro (K) attraverso il cursore (L), finché la cinghia addominale non avrà raggiunto la sua regolazione più lunga.

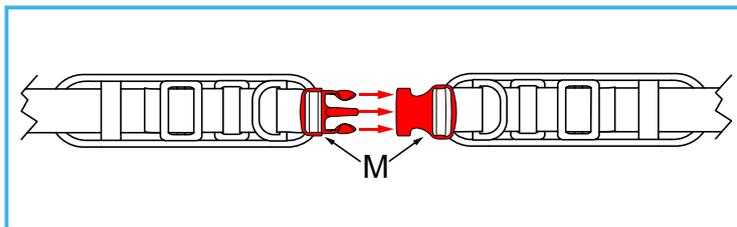

- Posizionare l'utente nella sedia, quindi allacciare la cinghia addominale con la fibbia (M), lasciandola allentata, attorno ai fianchi dell'utente.

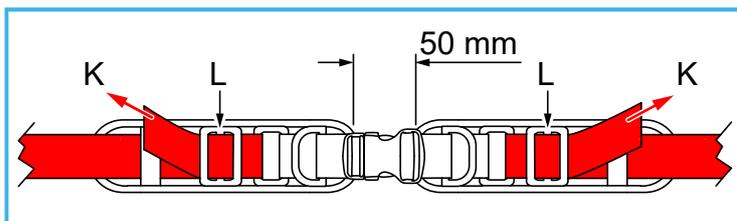


- Regolare l'aderenza della cinghia addominale facendo passare il nastro in eccesso (K) attraverso i cursori (L) su ciascun lato, finché la cinghia addominale non avrà raggiunto un aggiustamento libero. Verificare che vi sia uno spazio di 50 mm circa tra le sezioni imbottite.

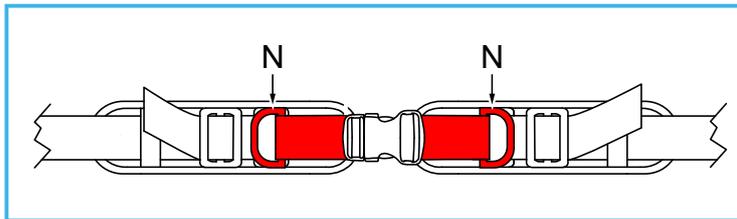

- Per la regolazione finale allo scopo di assicurare un aggiustamento serrato, esercitare una trazione sui due elementi a D sul davanti (N) per chiudere lo spazio tra le sezioni imbottite.

5.7 Rimozione del supporto divisorio

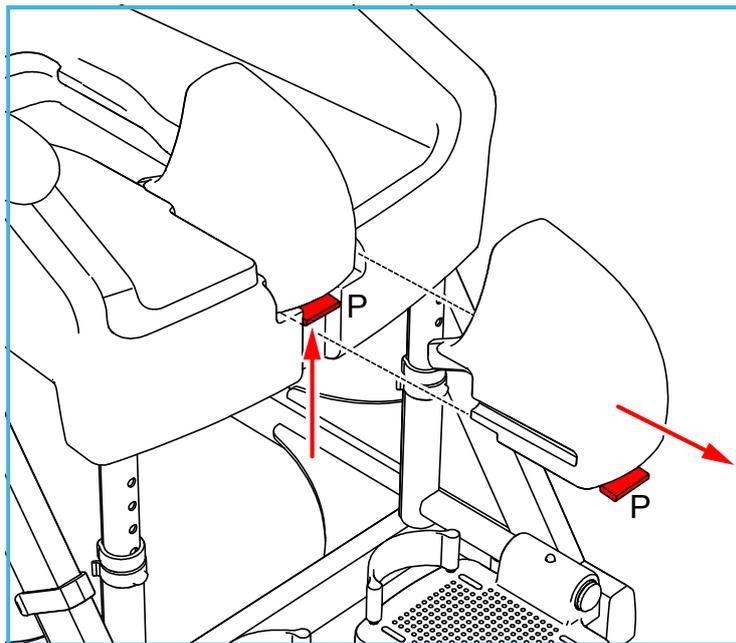


Sollevare il fermo del supporto divisorio (P) per sganciare quest'ultimo, quindi fare scorrere il supporto divisorio verso l'esterno.

5.8 Uso della tazza WC

AVVERTENZA: Consigliamo di non inserire/rimuovere la tazza WC se la sedia è occupata dall'utente, per minimizzare il rischio di intrappolamento.

AVVERTENZA: Quando piena, la tazza WC può essere pesante.

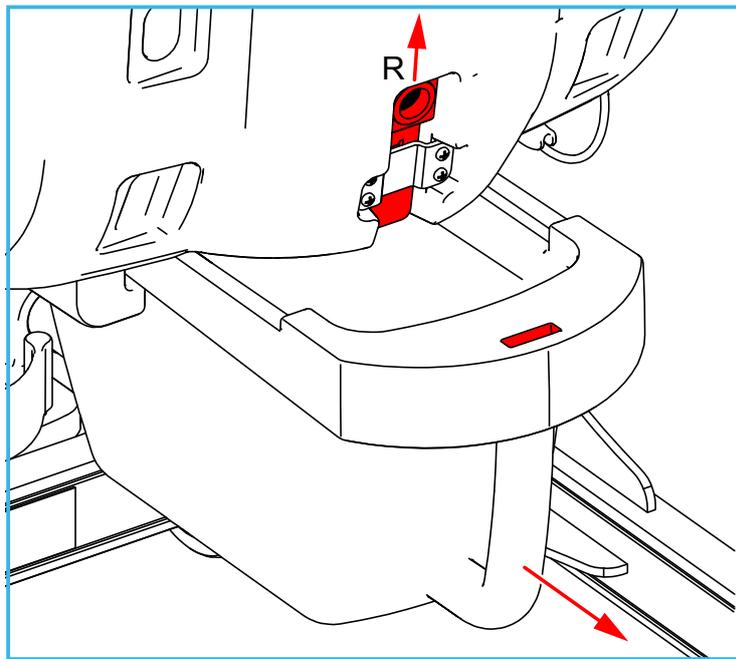

- Per inserire la tazza WC, sollevare la relativa chiusura (R) e allineare la tazza WC con le due scanalature sotto al sedile, quindi farla scorrere in posizione. La chiusura (R) deve quindi essere rilasciata: a questo punto, essa deve scattare in posizione nella fessura nella tazza WC.

- Per rimuovere la tazza WC, sollevare la chiusura (R) ed estrarre la tazza WC, avendo cura di evitare versamenti.


6. FUNZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI

Tutti gli accessori possono essere ordinati direttamente presso l'Assistenza Clienti NRS o presso un rivenditore.


6.1 Installazione e utilizzo delle imbracature per l'addome e incrociata

Le imbracature per l'addome e incrociata vengono fornite separatamente come accessori opzionali. Entrambe le imbracature sono installate con lo stesso procedimento.

Assicurarsi di disporre della sedia della misura corretta:

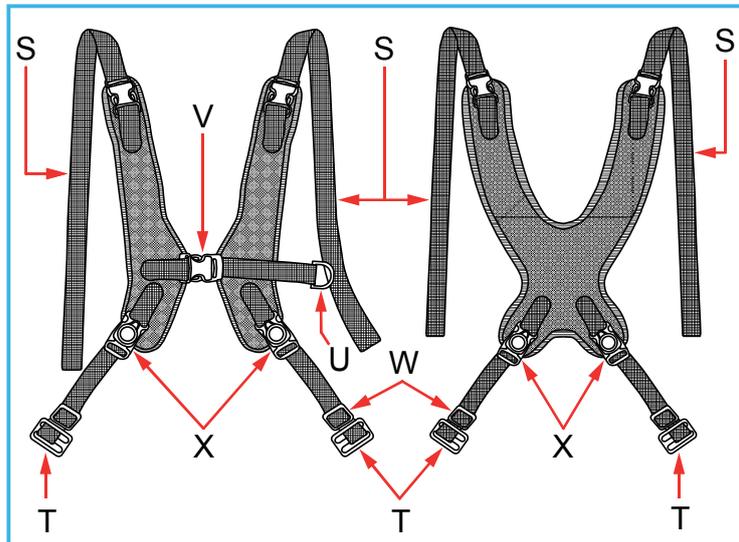


Imbracatura per l'addome	Imbracatura incrociata
N72139: Piccola	N72152: Piccola
N72140: Media	N72164: Media
N72723: Grande	N72759: Grande

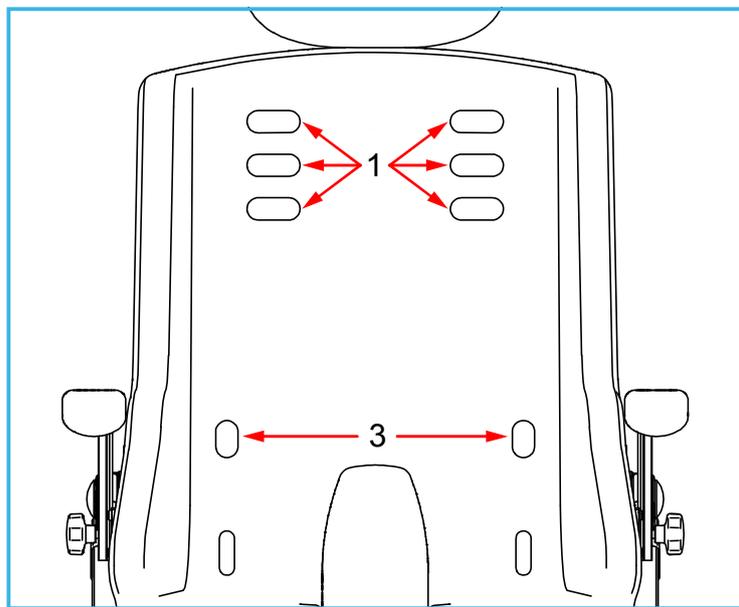

Parte anteriore della sedia

- Far passare le cinghie superiori (S) attraverso le fessure superiore nel sedile/imbottitura (1). Sono presenti tre coppie di fessure, che consentono una regolazione diversa dell'altezza dell'imbracatura.

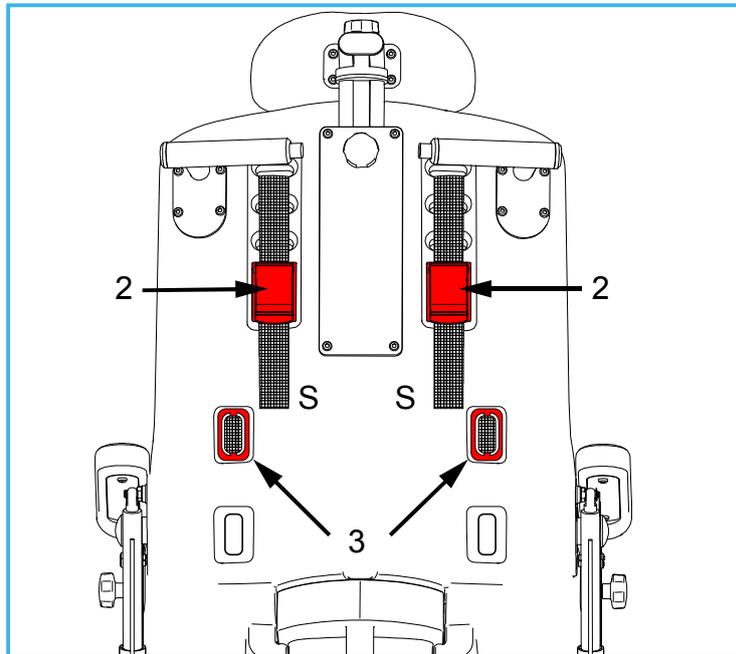

Parte posteriore della sedia

- Far passare le cinghie superiori (S) verso il basso attraverso i fermi a camma (2), quindi bloccare in posizione chiusa i fermi a camma.

Nota: In questa fase, lasciare le cinghie molto allentate.

- Far passare le fibbie (T) sulle cinghie inferiori attraverso le fessure inferiori nel sedile/imbottitura (3), ruotando le fibbie di 90 gradi e spingendo con decisione.
- Allineare le fibbie (T) in modo che siano installate a filo sul retro del sedile (come illustrato), quindi tirare le cinghie stringendole da davanti, per assicurarsi che siano strette a fondo.
- Utilizzare i cursori di regolazione (W) per regolare le cinghie inferiori.

Uso dell'imbracatura per l'addome

- Sganciare la fibbia centrale (V) e allentare la cinghia anteriore (U), quindi far sedere l'utente sulla sedia.
- Agganciare nuovamente la fibbia centrale (V), quindi tirare la cinghia anteriore (U) per assicurare l'utente.
- Stringere le cinghie superiori (S) dal retro della sedia, aprendo i fermi a camma (2) e tirando verso il basso le cinghie (S).
- Chiudere i fermi a camma (2) per assicurare le cinghie superiori (S).

Uso dell'imbracatura incrociata

- Sganciare le fibbie delle cinghie inferiori (X) dall'imbracatura.
- Sollevare l'imbracatura e far sedere l'utente sulla sedia.
- Abbassare l'imbracatura sull'utente e agganciare nuovamente le fibbie delle cinghie inferiori (X).
- Stringere le cinghie superiori (S) dal retro della sedia, aprendo i fermi a camma (2) e tirando verso il basso le cinghie (S).
- Chiudere i fermi a camma (2) per assicurare le cinghie superiori (A).


6.2 Installazione e uso dei supporti ventrali

Nota: Ciascun supporto ventrale è specifico del lato destro/sinistro della sedia.

AVVERTENZA: La sedia è progettata per essere utilizzata con i braccioli o i supporti ventrali in posizione. I supporti ventrali possono essere rimossi se sono d'intralcio per l'utente quando sale/scende dalla sedia (per esempio durante la movimentazione dell'utente con il sollevatore o per i trasferimenti laterali). Tuttavia, i supporti ventrali devono sempre essere installati quando si aziona la funzione di inclinazione dell'assetto della sedia.

I supporti ventrali non sono progettati per sostenere l'intero peso dell'utente. Se l'utente dovesse sedersi sopra, questi verrebbero danneggiati.


Assicurarsi di disporre della sedia della misura corretta:

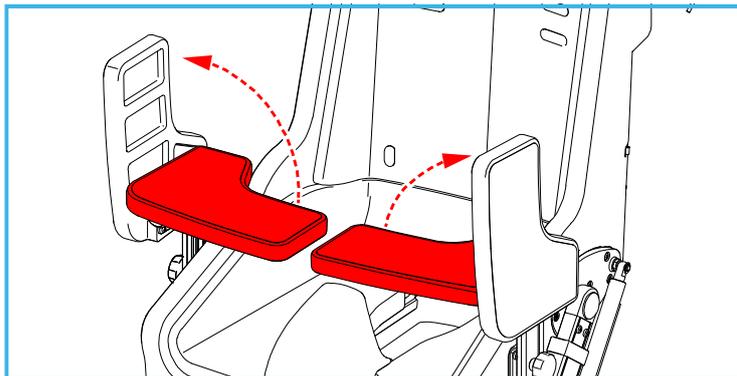


Supporto ventrale

N72127: Piccolo

N72188: Medio/grande

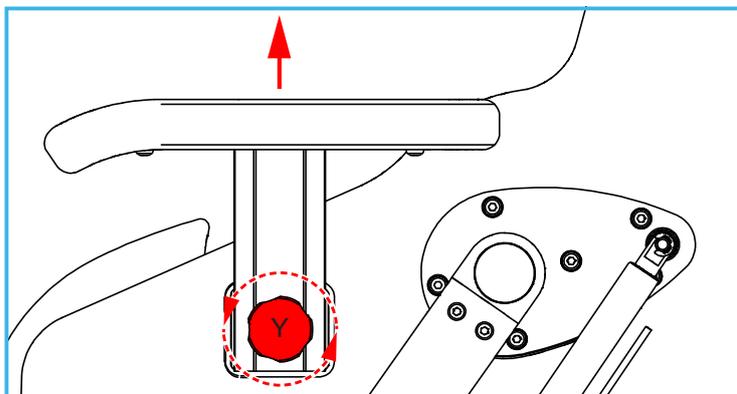

1. Ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (Y) e fare scorrere i braccioli sfilandoli dalle piastre di montaggio.

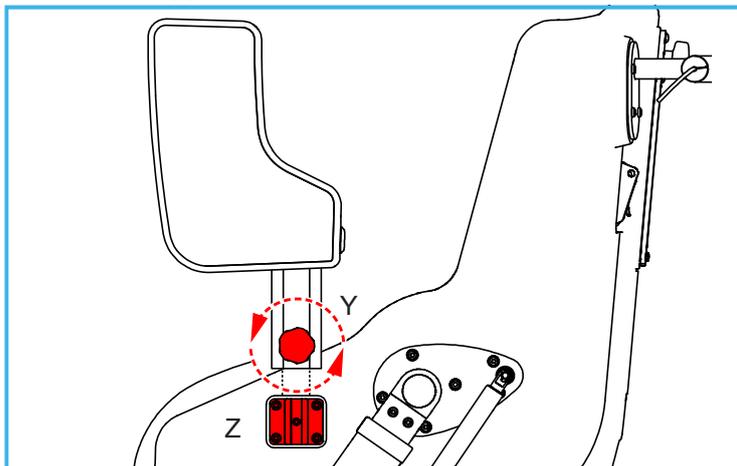

1. Ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (Y) per allentare.
2. Infilare i supporti ventrali sulle piastre di montaggio (Z) su entrambi i lati della sedia.
3. Stringere in senso orario la manopola di regolazione (Y) per fissare i supporti.
4. Per rimuovere i supporti ventrali, usare lo stesso metodo dei braccioli.

7. CURA E MANUTENZIONE

Consigliamo vivamente di controllare il prodotto a intervalli regolari, verificando che funzioni correttamente e non presenti danni.

7.1 Controlli settimanali


Controllare che il montante a gas sia pulito e privo di danni (fare riferimento alla Sezione 7.6 per i dettagli relativi alla pulizia)

7.2 Controlli mensili

Controllare che non vi siano parti allentate o con danni evidenti, né viti allentate o mancanti.


Controllare che la seduta sia salda e non presenti alcun gioco.

AVVERTENZA: Qualora si dovessero individuare un guasto o un danno qualsiasi, **INTERROMPERE** immediatamente l'utilizzo della sedia.

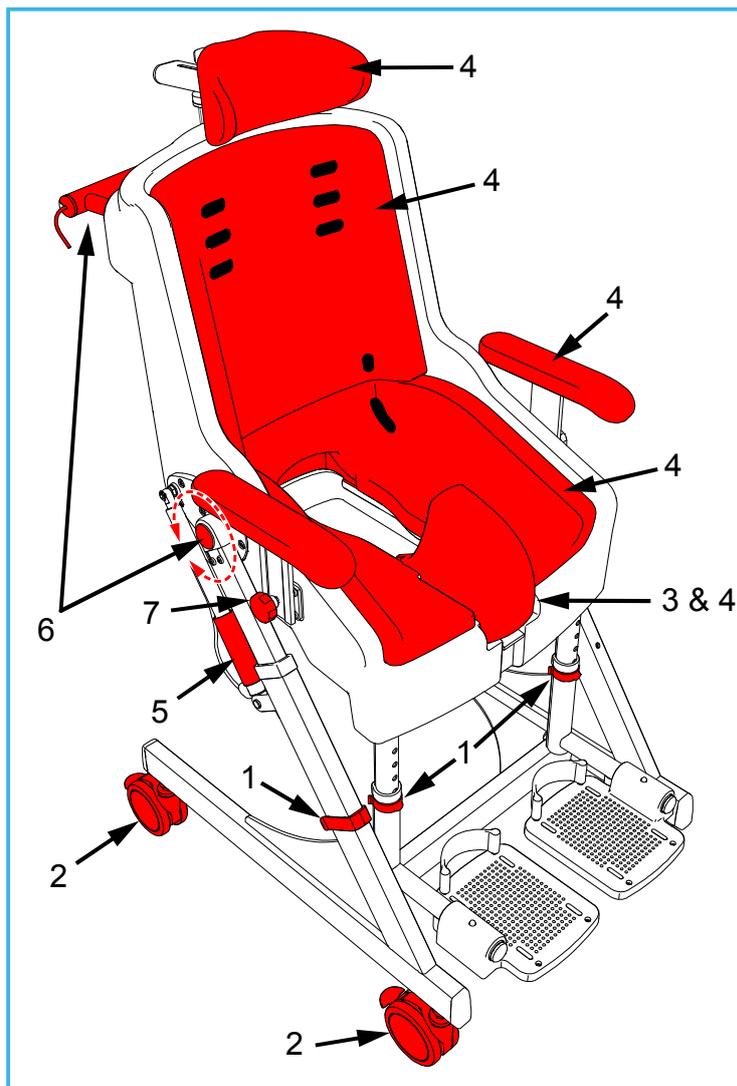

1. Controllare che tutti i fermi di regolazione dell'altezza siano saldamente posizionati (vedere la sezione 5.2, 5.3).

- Controllare che tutte le ruote orientabili siano libere di ruotare e che i freni si blocchino correttamente (vedere la sezione 5.1). Se uno dei freni non dovesse funzionare, interrompere immediatamente l'utilizzo della sedia.
- Controllare che il supporto divisorio si blocchi in posizione e non scivoli fuori dalla sua sede se tirato (vedere la sezione 4.4, 5.7).
- Controllare che le parti morbide sagomate (imbottiture del sedile, poggiatesta, braccioli, supporto divisorio) non presentino danni. Se una di queste parti è danneggiata, deve essere sostituita.

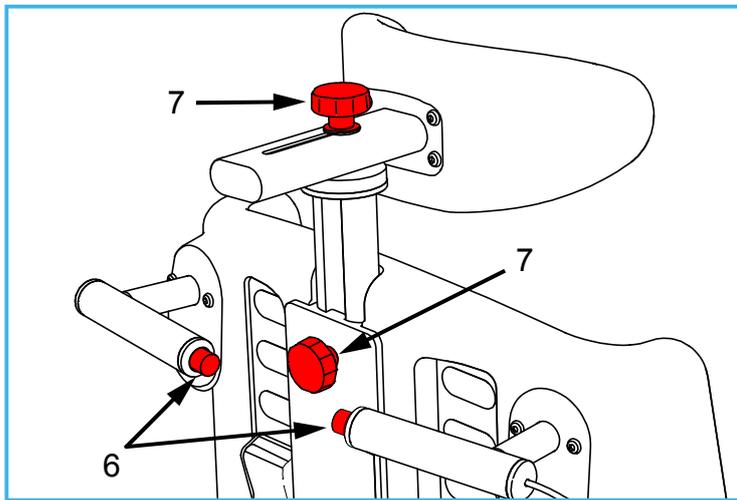

- Controllare che il meccanismo di inclinazione dell'assetto funzioni in modo scorrevole. Assicurarsi che esso si blocchi completamente quando si rilasciano i pulsanti a pressione rossi (vedere la sezione 5.5).

Controllare il complessivo, verificando che non presenti perdite di fluido idraulico.

Interrompere immediatamente l'uso della sedia se il meccanismo dovesse diventare difficile da azionare, se non si dovesse bloccare correttamente o se dovesse perdere fluido idraulico.

- Controllare che tutte le manopole di regolazione e gli elementi di fissaggio siano saldamente fissati. Prestare particolare attenzione ai braccioli (vedere la sezione 4.7), ai poggiatesta (vedere la sezione 5.4) e ai supporti ventrali (vedere la sezione 6.2).
- Controllare tutte le cinghie e le imbracature, verificando l'eventuale presenza di segni di danni al nastro o alle fibbie. Gli elementi danneggiati devono essere sostituiti immediatamente.

Si prega di contattare i Servizi di Assistenza Clienti NRS Healthcare per segnalare un guasto o prenotare un'ispezione da parte di un tecnico dell'assistenza.

Fare riferimento alla sezione 13 per una lista dettagliata di parti di ricambio.

7.3 Ispezione annuale

Consigliamo di fare controllare annualmente questo prodotto da un tecnico qualificato, che ne dovrà verificare il funzionamento sicuro e riparare le parti eventualmente danneggiate o mancanti.

7.4 Pulizia e disinfezione

La sedia deve essere pulita a intervalli regolari ed essere asciugata completamente dopo ciascun utilizzo.

L'operazione di pulizia della sedia costituisce un'opportunità ideale per individuare eventuali segni di usura o danni (vedere la sezione 7).

Inoltre, la pulizia regolare è essenziale per minimizzare il rischio di trasmissione di infezioni tra utenti e prestatori di assistenza. Questo è particolarmente importante in un ambiente multi-utente.

Si dovrà prestare particolare attenzione a pulire l'interfaccia tazza WC/sedia, tra le imbottiture, il supporto divisorio, il sedile e il montante a gas.

AVVERTENZA: Esiste il rischio di trasmissione delle infezioni al prestatore di assistenza durante la pulizia della sedia. Durante la pulizia o la manutenzione, indossare un equipaggiamento protettivo.

- Pulire regolarmente utilizzando un detersivo neutro multiuso e acqua calda.
- Controllare l'idoneità dei prodotti per la pulizia prima dell'uso. Non utilizzare detersivi o panni abrasivi dato che questi potrebbero danneggiare permanentemente la superficie e invalidare ogni garanzia.
- Per disinfettare, utilizzare una soluzione di candeggina diluita, poi risciacquare accuratamente con acqua dolce.
- Dopo aver pulito la sedia, verificarne la funzionalità.


7.5 Pulizia della cinghia addominale e dell'imbracatura

- Pulire con una spugna e acqua calda saponata.
- Non utilizzare candeggina o solventi.
- Non pulire a vapore, non utilizzare l'asciugatrice, non lavare a secco.

7.6 Pulizia del montante a gas

Nota: Consigliamo di pulire settimanalmente il meccanismo del montante a gas.

Nota: Per le zone caratterizzate da acqua dura, raccomandiamo di utilizzare acqua filtrata/depurata per la pulizia.

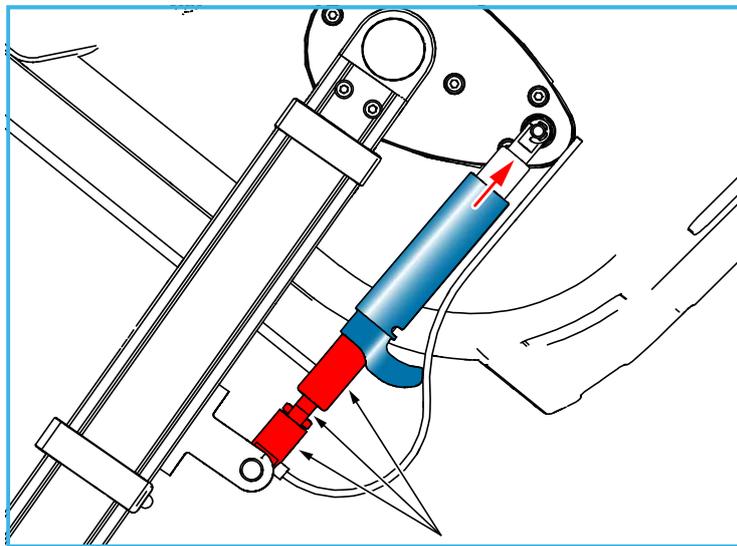

- Sollevare il coperchio di plastica sul montante a gas (tirando verso l'alto) e pulire con acqua la parte inferiore del montante a gas. Abbassare il coperchio di plastica e spingerlo in giù per fissarlo.
- Ripetere la procedura per il lato opposto.

8. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto deve essere pulito accuratamente prima dello smaltimento.

Questo prodotto è realizzato con metallo e plastica e può essere smaltito tramite i centri locali per la gestione dei rifiuti o le imprese locali di raccolta dei rifiuti.

9. GARANZIA DEL PRODOTTO

NRS Healthcare garantisce questo prodotto per un periodo di 24 mesi, dalla data di acquisto, contro difetti di materiali e di lavorazione.

Questa garanzia non copre cattivo uso, uso improprio, interferenza o manomissione di qualsiasi parte del prodotto.

Ogni garanzia rilasciata da NRS Healthcare non ha effetti sui diritti legali.

9.1 Condizioni

Il meccanismo di inclinazione deve essere pulito regolarmente per lavare via sali/depositi di calcio/prodotti detergenti, come indicato nella Sezione 7. Questo è particolarmente importante nelle zone con acqua dura.

La nostra Azienda si riserva il diritto di escludere il meccanismo di inclinazione dalla garanzia qualora il montante a gas non sia stato pulito regolarmente e vi siano segni di un importante accumulo di sali/calcio/prodotti detergenti sul meccanismo.


Le imbottiture e le cinghie sono garantite soltanto per 1 anno, dato che si tratta di parti consumabili.

10. PRODOTTI STANDARD

BS EN 12182:2012 (Prodotti destinati all'assistenza di persone con disabilità. Requisiti generali e metodi di prova)

BS EN ISO 14971:2012 (Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici)

11. DIMENSIONI DELLA SEDIA SEAHORSE PLUS

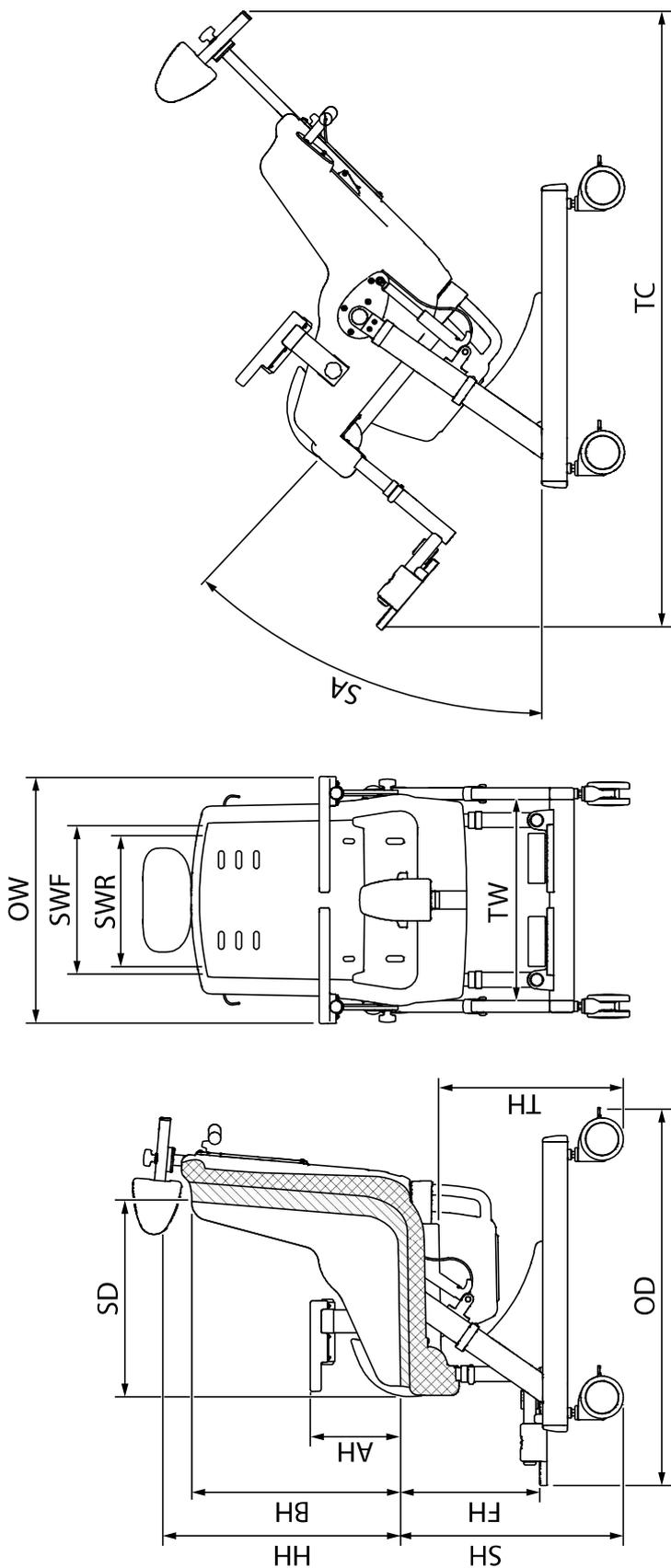

Caratteristiche	Seahorse Plus piccola N72012			Seahorse Plus media N72024			Seahorse Plus grande N72036				
	Rif	Imbottitura spessa piccola - Taglia 1	Imbottitura sottile piccola - Taglia 2	Nessuna imbottitura	Imbottitura spessa media - Taglia 3	Imbottitura media - Taglia 4	Nessuna imbottitura	Imbottitura spessa grande - Taglia 5	Imbottitura grande - Taglia 6	Imbottitura extra-spessa grande - Taglia 7	Nessuna imbottitura
Profondità sedile	SD	327 mm	355 mm	374 mm	425 mm	457 mm	470 mm	425 mm	455 mm	455 mm	488 mm
Larghezza posteriore del sedile	SWR	258 mm	294 mm	332 mm	303 mm	339 mm	378 mm	411 mm	447 mm	375 mm	477 mm
Larghezza anteriore del sedile	SWF	294 mm	334 mm	365 mm	393 mm	393 mm	423 mm	460 mm	500 mm	420 mm	530 mm
Altezza dello schienale	BH	391 mm	391 mm	414 mm	490 mm	490 mm	514 mm	549 mm	549 mm	549 mm	572 mm
Altezza minima del poggiatesta	HH	456 mm	456 mm	475 mm	562 mm	562 mm	584 mm	620 mm	620 mm	620 mm	641 mm
Altezza massima del poggiatesta	HH	631 mm	631 mm	650 mm	737 mm	737 mm	759 mm	795 mm	795 mm	795 mm	816 mm
Altezza minima del sedile	SH	540 mm	540 mm	521 mm	521 mm	521 mm	501 mm	521 mm	521 mm	521 mm	501 mm
Altezza massima del sedile	SH	648 mm	648 mm	629 mm	625 mm	625 mm	609 mm	629 mm	629 mm	629 mm	609 mm
Altezza minima dei poggiatesti	FH	275 mm	275 mm	255 mm	325 mm	325 mm	305 mm	325 mm	325 mm	325 mm	305 mm
Altezza massima dei poggiatesti	FH	375 mm	375 mm	355 mm	425 mm	425 mm	405 mm	450 mm	450 mm	450 mm	430 mm
Larghezza totale (incluso supporto ventrale)	OW	532 mm	532 mm	532 mm	586 mm	586 mm	586 mm	692 mm	692 mm	692 mm	692 mm
Profondità totale (in posizione eretta)	OD	807 mm	807 mm	807 mm	860 mm	860 mm	860 mm	877 mm	877 mm	877 mm	877 mm
Circonferenza massima di rotazione (posizione inclinata)	TC	1209 mm	1209 mm	1209 mm	1413 mm	1413 mm	1413 mm	1488 mm	1488 mm	1488 mm	1488 mm
Altezza minima al di sopra del water	TH	461 mm	461 mm	461 mm	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm
Altezza massima al di sopra del water	TH	569 mm	569 mm	569 mm	551 mm	551 mm	551 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Larghezza minima al di sopra del water	TW	426 mm	426 mm	426 mm	478 mm	478 mm	478 mm	592 mm	592 mm	592 mm	592 mm
Altezza tra supporto ventrale e sedile	AH	179 mm	179 mm	199 mm	214 mm	214 mm	234 mm	214 mm	214 mm	214 mm	234 mm
Angolo minimo del sedile	SA	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolo massimo del sedile	SA	40°	40°	40°	40°	40°	40°	40°	40°	40°	40°
Peso utente massimo		63,5 kg	63,5 kg	63,5 kg	102 kg	102 kg	102 kg	152 kg	152 kg	152 kg	152 kg
Peso del prodotto (incluse le imbottiture)		21 kg	20,1 kg	18,7 kg	26 kg	24,5 kg	22,3 kg	29,2 kg	27,7 kg	27,7 kg	24,8 kg

12. RICERCA DEI GUASTI

Problema	Azione
Le ruote orientabili non girano	Controllare che le ruote orientabili siano pulite e prive di ostruzioni
La sedia non si sposta in modo scorrevole	Controllare che i freni delle ruote orientabili non siano inseriti (vedere la sezione 5.1)
I freni delle ruote orientabili non si inseriscono	
Il sedile non è in piano/fissato	Sostituire le ruote orientabili se difettose (vedere la sezione dei ricambi 13)
I poggiatesta non sono in piano	Controllare che i fermi di regolazione dell'altezza siano in posizione e inseriti nei fori corretti (vedere la sezione 5.2)
Il sedile oscilla attorno al perno di articolazione	Controllare che i fermi di regolazione dell'altezza siano inseriti nei fori corretti (vedere la sezione 4.1 e 5.3)
I braccioli/supporti ventrali non si estraggono	Verificare la presenza di viti/elementi di fissaggio allentati/mancanti. Possibile danneggiamento delle molle a gas – contattare l'Assistenza Clienti NRS o il rivenditore per la sostituzione/riparazione
Braccioli/supporti ventrali allentati	Controllare che la manopola sia svitata prima della rimozione (vedere le sezioni 4.7 e 6.2)
Poggiatesta allentato	Controllare che la manopola sia completamente serrata (vedere le sezioni 4.7 e 6.2)
Il supporto divisorio si sfilta	Controllare che le manopole siano completamente serrate (vedere la sezione 5.4)
La tazza WC fuoriesce dalle guide di scorrimento	Controllare che il fermo del supporto divisorio sia in posizione e produca un clic udibile (vedere la sezione 5.7). Se il fermo è danneggiato, sostituire il supporto divisorio (vedere la sezione dei ricambi 13)
La cinghia addominale si allenta	Controllare che la chiusura della tazza WC sia ubicata nella fessura della tazza WC (vedere la sezione 5.8). Se la chiusura non si impegna, controllare che la tazza WC sia inserita completamente
Le imbracature si allentano	Controllare le fibbie sul retro della sedia, assicurandosi che le fibbie posteriori siano saldamente premute attraverso lo schienale del sedile (vedere la sezione 4.6)
La sedia non si inclina	Controllare che i fermi a camma siano completamente bloccati. Controllare che le fibbie posteriori siano saldamente premute attraverso lo schienale del sedile (vedere la sezione 6.1)
	Assicurarsi che i pulsanti siano premuti completamente prima di esercitare una pressione verso il basso sulle maniglie (vedere la sezione 5.5).
	Verificare che il fondo del montante a gas sia pulito e privo di detergente/sporcizia (vedere la sezione 7.6). Se la sedia continua a non inclinarsi, contattare l'Assistenza Clienti NRS o il rivenditore.

13. PARTI DI RICAMBIO

Codice magazzino	Ricambi Descrizione	Qualifica di chi deve intervenire
N72176	Poggiatesta	Cliente
N84183	Supporto divisorio piccolo	Cliente
N72199	Supporto divisorio medio	Cliente
P01298	Supporto divisorio grande	Cliente
N72206	Tazza WC	Cliente
P57899	Leva di sganciamento della tazza WC	Tecnico
N72395	Poggiapiedi bloccabili piccoli (coppia) incluse le cinghie ferma-piedi	Cliente
N72401	Poggiapiedi bloccabili medi (coppia) incluse le cinghie ferma-piedi	Cliente
N81815	Poggiapiedi bloccabili grandi (coppia) incluse le cinghie ferma-piedi	Cliente
P01274	Set di cinghie ferma-piedi piccole (x4)	Cliente
P01286	Set di cinghie ferma-piedi medie/grandi (x4)	Cliente
M99369	Ruota orientabile da 100 mm (cadauna)	Tecnico
P42483	Ruota orientabile da 125 mm (x4)	Tecnico
N72231	Complessivo montante a gas e cavo piccolo	Tecnico
N72917	Complessivo montante a gas e cavo medio/grande	Tecnico
P77710	Complessivo piastra di articolazione	Tecnico
P77722	Complessivo fermo a camma	Tecnico
N72243	Set di fermi a E per regolazione altezza e poggiatesta	Cliente
N72371	Set di dadi a T per manopola e poggiatesta	Cliente
N72383	Set di elementi di fissaggio (viti, rondelle, fermi)	Varia a seconda della parte
N93994	Set di accessori di plastica	Varia a seconda della parte
N99089	Cinghia addominale piccola	Cliente
N99091	Cinghia addominale media	Cliente
N99108	Cinghia addominale grande	Cliente
N73211	Braccioli piccoli e medi (coppia)	Cliente
N85171	Braccioli grandi (coppia)	Cliente

14. GLOSSARIO

	Costruttore		Codice di riferimento lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Lingue disponibili		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Dispositivo medico
	Numero di articolo/ catalogo		Conformità Europea/ Conformité Européene		Marchio di omologazione della conformità del Regno Unito
	Peso utente massimo		Avvertenza		Nota importante

UK CA NRS HEALTHCARE Sherwood House,
Cartwright Way, Forest Business Park,
Bardon Hill, Coalville, Leicestershire,
LE67 1UB, Regno Unito.

CE NRS HEALTHCARE 4C Altona Road,
Blaris Industrial Estate, Lisburn, Co. Antrim,
 Irlanda del Nord BT27 5QB

Tel: Assistenza clienti: +44 345 121 8111

E-mail: customerservice@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare è un fornitore all'avanguardia di attrezzature per comunità e dispositivi di ausilio per la vita quotidiana.

Visitate uno dei nostri siti web per visualizzare la nostra gamma completa di prodotti:

www.healthcarepro.co.uk or www.completecareshop.co.uk